

Biološki indikatori sterilizacije

Kontrola sterilizacije biološkim indikatorima u ambulantama i bolnici radi se prema propisima i planu kontrole. U našem laboratoriju se koriste biološki indikatori "duo spore" koji služe za dokazivanje efikasnosti sterilizacije suhom toplinom, vodenom parom ili plinom. Set indikatora i uputa za upotrebu se može dobiti u našem laboratoriju.

PAKIRANJE sadrži dva dijela. U jednom dijelu su dvije test trakice a drugom je kontrolna trakica.

Trakice su impregnirane s :

$2,5 \times 10^5$ spora *Geobacillus stearothermophilus*

$6,0 \times 10^6$ spora *Bacillus atrophaeus*

POSTUPAK :

Plavi dio omotnice je zatvoren, u njemu se nalazi kontrola i on se **ne otvara**.

Bijeli dio omotnice je otvoren i u njemu se nalaze dvije test-trake. Svaka test traka je pakirana posebno u prozirni papir , koji se **ne otvara**.

1. Izvaditi test trakice u prozirnog papiru i tako ih staviti u pakete materijala koji se sterilizira. Izabrati područja koja su najmanje dostupna sterilizaciji. Test trakice u prozirnog papiru obilježiti brojevima 1 i 2.
2. Sterilizirati normalnom procedurom.
3. Nakon sterilizacije test trake se izvade i vrate u bijeli dio omotnice.
4. Na bijelom dijelu omotnice popuniti podatke tj napisati mjesto gdje se nalazila prva a gdje druga test trakica (npr : paket u sredini sterilizatora, kod vrata i sl.). Također popuniti i podatke o vrsti sterilizacije, temperaturi ciklusa i vremenu trajanja ciklusa.

Izveštaj sterilizacije

Tko šalje _____

Datum sterilizacije _____

Sterilizator _____

Sterilizacija _____

Mjesto na kojem je bila test trakica :

#1 _____

#2 _____

Uvjeti sterilizacije :

- Para
- Suha toplina
- Etilen oksid

Temperatura _____


Vrijeme izlaganja _____

Potpis _____

Odjel _____

NALAZ

Nalaz je gotov za 7 dana. Sve informacije o tijeku pretrage medicinsko osoblje može dobiti na telefon 300 852.

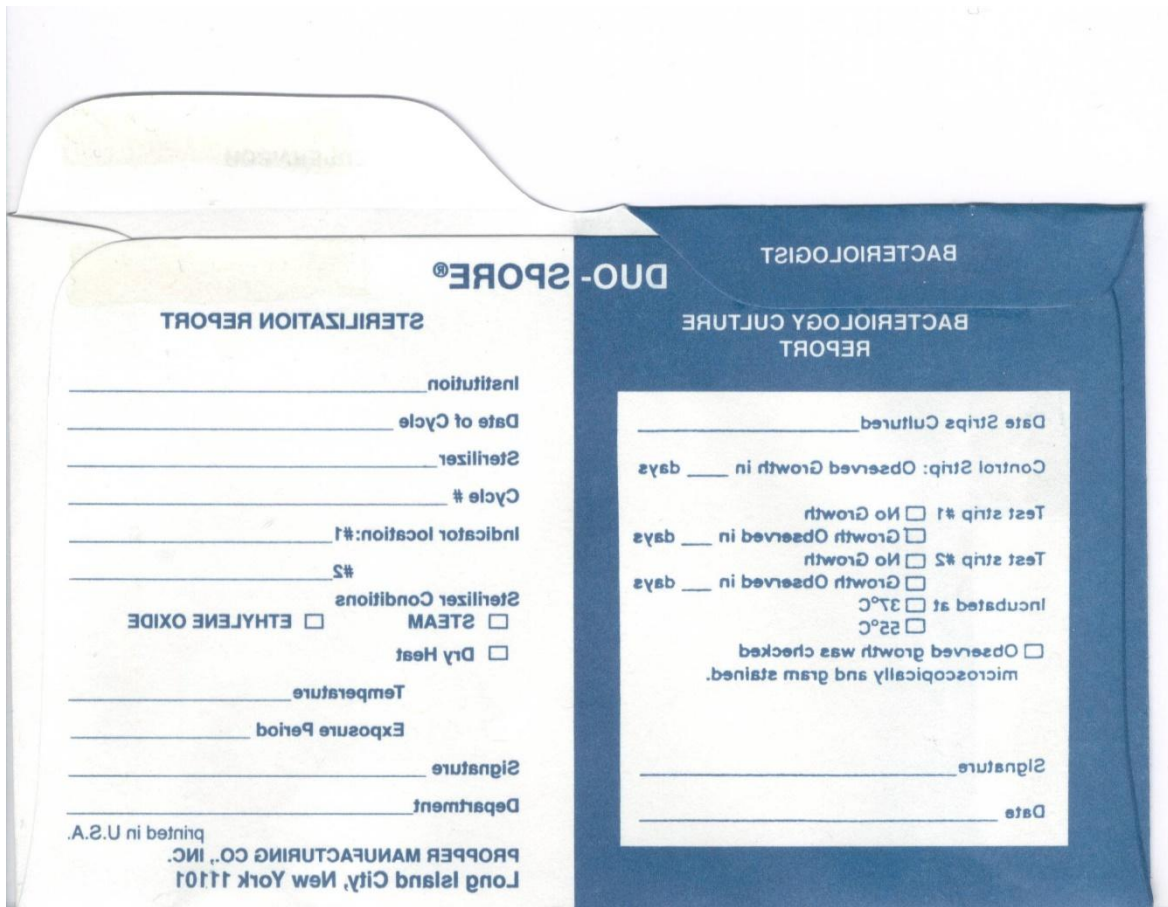

Ovu stranu paketa NE OTVARATI

Test – trakice označiti brojevima 1 i 2. Bez otvaranja ih staviti u pakete koje sterilizirate ili na određena mjesta u aparatu koja želite provjeriti (npr kraj vrata, u sredinu i sl.)

