

## Obrisak ždrijela

- najčešći uzročnik bakterijskog tonzilofaringitisa je beta-hemolitički streptokok grupe A (BHS-A) – *Streptococcus pyogenes*.
- Ostale uzočnike nije potrebno rutinski obrađivati, osim NA ZAHTJEV KLINIČARA (grupa C i G streptokoka, *Arcanobacterium haemolyticum*, *Neisseria gonorrhoea*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Corynebacterium ulcerans* ), a prema epidemiološkoj situaciji
- Kliconošтво na multiplorezistentne bakterije u sklopu aktivnog probira ili nadzora nad infekcijama povezanim sa zdravstvenom skrbi određuje se prema dogovoru i u skladu sa prihvaćenim preporukama za populacije pacijenata definirane istim tim preporukama
- Vincentova angina ili akutni nekrotizirajući ulcerativni gingivitis je stanje karakterizirano faringitisom i teškom upalom zubnog mesa, a uzrokovana je anaerobnim fuziformnim štapićima ( *Fusobacterium* spp. ) i spirohetom *Borrelia vincenti*. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i mikroskopijom preparata obriska ždrijela ( ciljane lezije ) obojanog po Gramu
- Lemierreova bolest uzrokovana je s *Fusobacterium necrophorum*, ili rjeđe drugim vrstama roda *Fusobacterium*. Klinički uzorak izbora za postavljanje dijagnoze je hemokultura.

## UZIMANJE :

- Pripremiti sterilni pamučni bris s epruvetom i špatulu.
- Pacijent sjedne prema izvoru svjetlosti, proguta eventualno nakupljenu slinu, zabaci glavu i duboko diše *i otvori usta*.
- Špatulom se lagano pritisne baza jezika, a pacijent izgovara "aaaaaa". Čvrsto se obrišu tonzile, nepčani lukovi i stražnja stijenka orofarinksa pazeći da se ne dotakne uvula, jezik, niti bukalna sluznica zbog moguće kontaminacije fiziološkom florom usne šupljine
- Uzorak se po dopremi u laboratorij obrađuje u roku od 30 minuta do dva sata od uzimanja


## TRANSPORT I POHRANA UZORKA

- Uzorke je potrebno transportirati što je prije moguće na jedan od slijedećih načina:
  - a) Bez transportnog medija na sobnoj temperaturi (ST) do 2 sata od uzimanja uzorka
  - b) U transportnom mediju ( Stuart, Amies ) do 24 sata na sobnoj temperaturi (ST) od uzimanja uzorka

- c) Ako nema transportnog medija, prihvatljiva je opcija pohrana uzorka na +4°C do 24 sata od uzimanja uzorka ( manje povoljno )

**NALAZ :**

Pacijent se naručuje za 4 dana iako 70% nalaza bude gotovo za dva dana. Liječnik koji je uputio pacijenta već nakon 24 sata putem telefona 300 - 852 može dobiti informaciju o tijeku pretrage i preliminarnom nalazu.

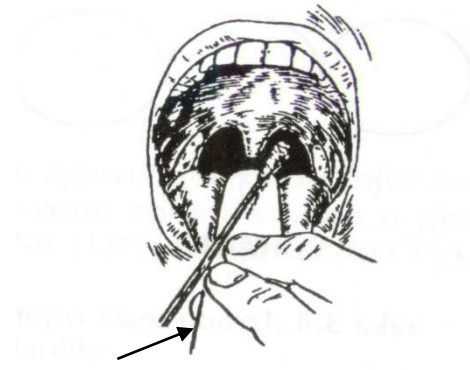

špatula

Uzimanje brisa ždrijela